

GEBRAUCHSANWEISUNG

HYPEX® LITE

KNIEFÜHRUNGSSORTHESE

MIT 4-PUNKT-PRINZIP UND EXTENSIONS- / FLEXIONSBEGRENZUNG



Hypex® Lite

Gebrauchsanweisung

Inhalt

1. Einführung	4
1.1. Vorwort	4
1.2. Kundeninformation	4
1.3. Funktionsweise	4
1.4. Zweckbestimmung	4
1.5. Lieferumfang	4
1.6. Konformitätserklärung	4
1.7. Merkmale	5
1.8. Indikationen	5
1.9. Kontraindikationen	5
1.10. Sicherheitshinweise	6
1.11. Garantie	6
2. Einstellungen durch den Orthopädietechniker	7
2.1. Anzugsdrehmomente bei der Einstellung und Anpassung der Orthese	7
2.2. Anpassung an den Patienten	9
2.2.1. Anpassen der Schiene an die Beinkontur durch „Schränken“	9
2.3. Einstellung der Gelenke bei der Hypex® Lite Schiene L/L, L/M, M/L, M/S	10
2.3.1. Abdeckung öffnen	10
2.3.2. Extensionsanschlag Einstellen	11
2.3.3. Feineinstellung einstellen	12
2.3.4. Flexionsanschlag einstellen	12

Gebrauchsanweisung

2.3.5. Immobilisieren	13
2.3.6. Uneingeschränkte Flexion einstellen	14
2.4. Einstellung der Gelenke bei der Hypex® Lite Schiene S/S, XS/XS, XXS	15
2.4.1. Abdeckung abnehmen	15
2.4.2. Extensionsanschlag einstellen	16
2.4.3. Flexionsanschlag einstellen	16
2.4.4. Immobilisieren	17
2.4.5. Abdeckung aufsetzen	17
2.5. Anlegen der Schiene durch den Orthopädietechniker	18
2.5.1. Anlegen der Schiene	18
2.5.2. Einstellen der Textilschale bei Größe S/S, XS/XS, XXS	19
2.5.3. Clipverschlüsse verwenden	20
3. Wartung	21
4. Reinigung und Desinfektion	21
4.1. Polster und Gurte	21
4.2. Stützen (Gelenke)	21
5. Technische Daten / Materialien	22
6. Größentabelle und Artikelnummernübersicht	23
7. Weitergabe	24
8. Entsorgung	24

1. Einführung

1.1. Vorwort

Funktionelle Orthesen dienen zur Entlastung und Stabilisierung des Gelenk- und Bandapparates nach Traumen und operativen Eingriffen. Ihre Aufgabe ist es, Gelenke und Bänder während der Rehabilitation zu schützen, ohne dass sie einsteifen.

Unsere Orthesen gewähren Schutz und Führung während des Heilungsprozesses und erlauben eine schrittweise, kontrollierte Rückkehr zur vollen physiologischen Beweglichkeit.

1.2. Kundeninformation

Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Schiene diese Gebrauchsanweisung zu Ihrer eigenen Sicherheit aufmerksam und genau durch. Nur wenn alle Anweisungen, Hinweise und Vorgehensweisen gründlich gelesen und verstanden wurden, ist ein bestimmungsgemäßes Benutzen und Bedienen möglich. Sollte in der Gebrauchsanweisung etwas unverständlich sein, oder Anweisungen, Bedienungen oder Sicherheitshinweise nicht völlig klar nachvollziehbar sein, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Fachhandel oder direkt an die albrecht GmbH, bevor Sie die Schiene benutzen. Dies gilt im besonderen Maße für die Sicherheitshinweise.

Es ist darauf zu achten, dass das Produkt dem Krankheitsbild entsprechend angewendet wird. Des Weiteren darf das Produkt keinen korrosionsfördernden, ätzenden oder abrasiven Einflüssen, wie beispielsweise Wasser, Säure oder Sand ausgesetzt werden. Das Risiko einer Beschädigung infolge unsachgemäßer Anwendung tragen

die Anwender:Innen. Bitte klären Sie die Anwender:Innen dementsprechend auf.

1.3. Funktionsweise

Die **Hypex® Lite Knieführungsorthese** stabilisiert und entlastet das Kniegelenk bei der konservativen und postoperativen Rehabilitation. Die Schalen- und Gurtkonstruktion ermöglicht die komfortable und individuelle Anpassung der Schiene und trägt somit zu einem hohen Tragekomfort bei, wobei ein Verrutschen der Orthese verhindert wird. Die **Hypex® Lite** überzeugt nachweislich durch die gleiche Stabilität wie eine Hartrahmenorthese. **Der stufenlos einstellbare Extensionsanschlag bis -15° erlaubt eine individuelle endgradige Streckung.**

1.4. Zweckbestimmung

Die Schiene ist ausschließlich für die orthetische Versorgung des Kniegelenks einzusetzen.

1.5. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie nach Erhalt der Schiene deren Vollständigkeit.

- Orthese mit Polstern und Gurten
- Gebrauchsanweisung

1.6. Konformitätserklärung

Die albrecht GmbH erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung die Konformität der Schiene **Hypex® Lite** mit der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Gebrauchsanweisung

1.7. Merkmale

- Anatomisch geformte Gelenkstangen und Schalen
- Individuell einstellbares Gurtsystem
- Anschläge werkzeuglos einstellbar
- Einfaches Handling und hoher Tragekomfort
- Orthese kann im Heilungsverlauf auf wachsenden / sinkenden Umfang des Beins angepasst werden
- Minimierung der Zwangskräfte durch die gemischte Gelenkanordnung (polyzentrisch lateral und monozentrisch medial)

Hypex® Lite L/L, M/L, L/M, M/S:

- Stufenlose Feineinstellung der Extension von -15° bis 45°, somit physiologische Überstreckung möglich
- Flexion in 15° Schritten bis 90° einstellbar (max. Flexion 130°)
- Stufenlose Immobilisierung der Schiene von -15° bis 45°

Hypex® Lite S/S, XS/XS, XXS:

- Extensionsanschlag von -10° bis 100° in 10° Schritten einstellbar, somit physiologische Überstreckung möglich
- Flexionsanschlag von -10° bis 130° in 10° Schritten einstellbar
- Immobilisierung der Schiene von -10° bis 100° in 10° Schritten einstellbar
- Hoher Tragekomfort durch luftdurchlässige, leichte textile Schalenelemente

1.8. Indikationen

Der Arzt entscheidet über die Versorgung anhand seines diagnostischen Befundes. Allgemein ist die Versorgung mit der **Hypex® Lite** angezeigt bei:

- Kollateralbandverletzung
- Kreuzbandruptur
- Meniskusverletzung
- Nach Quadripsesehnenruptur
- Femurcondylenfraktur
- Patellafraktur
- Tibiakopffraktur
- Nach Meniskusrekonstruktion
- Nach Mikrofrakturierung, Pridiebohrung
- Nach Abrasionschondroplastik
- Nach Knorpeltransplantation
- Nach Umstellungsosteotomie
- Nach Implantation eines Kollagenmeniskusimplantats
- Patellaluxation
- Bei mittlerer Instabilität des Kniegelenks
- Genu recurvatum

Bei allen abweichenden Indikationen muss der Arzt gefragt werden.

1.9. Kontraindikationen

- Durchblutungsstörung
- Varikosis

1.10. Sicherheitshinweise

Die optimale Wirkung der Schiene wird nur bei korrekter Anwendung erzielt.

- Die Schiene darf nur im unversehrten, kompletten, mechanisch einwandfreien Zustand sowie kompletter und unbeschädigter Polsterung und Gurtung verwendet werden. Dies ist vor jeder Anwendung durch den Benutzer zu überprüfen.
- Das Offenlassen bzw. Entfernen einzelner oder mehrerer Gurte sowie übermäßiges Lockern der Gurtung während der Benutzung der Schiene führt zur Abnahme des therapeutischen Effektes der Schiene und kann zu Verletzungen führen.
- Die Schiene darf nicht auf offenen Wunden getragen werden.
- Die Haut sollte frei von Ölen, Fetten, Gelen oder anderen Rückständen sein, um Reaktionen der Haut bzw. der Materialstruktur zu vermeiden.
- Die Schiene sollte fest, aber nicht zu eng sitzen, um die Blutzirkulation nicht einzuschränken und die Nervenbahnen und Lymphgefäße nicht zu beeinträchtigen. Übermäßige Kompression ist also zu vermeiden.
- Eine Kombination mit anderen Produkten ist derzeit nicht vorgesehen oder ist mit dem Hersteller in Schrift zu vereinbaren.
- Die Schiene ist nicht für den Einmalgebrauch, jedoch für die mehrmalige Verwendung durch nur eine Person bestimmt.
- Das Produkt wird nicht steril geliefert.

- Bei allergischen Reaktionen setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- Beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen können. Schützen Sie die Orthese gegebenenfalls vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Zurzeit liegt keine Prüfung auf Entflammbarkeit vor. Lassen Sie bei dem Umgang mit offenen Flammen wie Feuerzeugen und Zigaretten in direkter Umgebung der Orthese Vorsicht walten.

1.11. Garantie





















Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus übernehmen wir für die Orthese für den Anwendungszeitraum von 6 Monaten eine Haltbarkeitsgarantie. Wir garantieren so bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine fehlerfreie Funktion der Orthese. Hiervon ausgenommen ist die Polsterung und Gurtung, die gewöhnlich einem gewissen Verschleiß unterliegt. Ein solcher Verschleiß stellt keinen Fehler des Produktes dar. Diese Herstellergarantie steht unter dem Vorbehalt, dass die Orthese als medizinisches Rehabilitationsgerät zu keinem anderen als dem in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck verwendet wird. Veränderungen an der Orthese oder das Entfernen / Beschädigung des QM-Siegels führt zum Erlöschen der Garantie.

Gebrauchsanweisung

2. Einstellungen durch den Orthopädietechniker

2.1. Anzugsdrehmomente bei der Einstellung und Anpassung der Orthese

Folgende Drehmomentabelle listet sämtliche Schrauben und Muttern, die bei der Einstellung und Anpassung der Orthese/des Gelenks gelöst und festgedreht werden können. Abhängig von Orthese/Gelenk reduziert sich die Anzahl der Schrauben und Muttern und nur ein Teil der Tabelle wird relevant.

Ansicht	Schraubenkopf	Schraubenart	Gewinde	Drehmoment	
		Linsenflansch	Innensechskant (SW 4)	M6	4,5-5 Nm
		Linsenflansch	Innensechskant (SW 2,5) mit rotem Faden	M4	1,5-2 Nm
		Linsenflansch	Innensechskant (SW 2,5)	M4	1,5-2 Nm
		Senkkopf	Innensechskant (SW 3)	M5	4,5-5 Nm
		Senkkopf	Innensechskant (SW 2,5) mit rotem Faden	M4	1,5-2 Nm
		Senkkopf	Innensechskant (SW 2,5) mit rotem Faden	M4	1,5-2 Nm
		Zentralschraube	Innensechskant (SW 2,5)	M4	2-2,2 Nm
		Senkkopf	Torx (TX 10)	M3	1,5-2 Nm
		Zylinderkopf	Innensechskant (SW 2,5)	Gewindefurchende Schraube für Kunststoffe Ø 4 mm	max. 0,8 Nm
		Gehäuselochmutter		M5	4,5-5 Nm

Hypex® Lite

Gebrauchsanweisung

Achtung:

Die Verwendung der Drehmomenttabelle entbindet den Anwender nicht von einer sorgfältigen Prüfung des Schraubfalls (Schrauben dürfen z.B. nicht verschmutzt oder beschädigt sein).


Schrauben, die keine Schraubensicherung („roter Faden“) besitzen, müssen mit einer zusätzlichen, mindestens mittelfesten Schraubensicherung versehen werden.

Gebrauchsanweisung

2.2. Anpassung an den Patienten

2.2.1. Anpassen der Schiene an die Beinkontur durch „Schränken“

Die Schiene ist anatomisch vorgeformt. Sollte diese Passform nicht für Ihren Patienten geeignet sein, können die Gelenkstangen unter Zuhilfenahme eines Schränkeisens an die Beinkontur des Patienten angepasst werden.

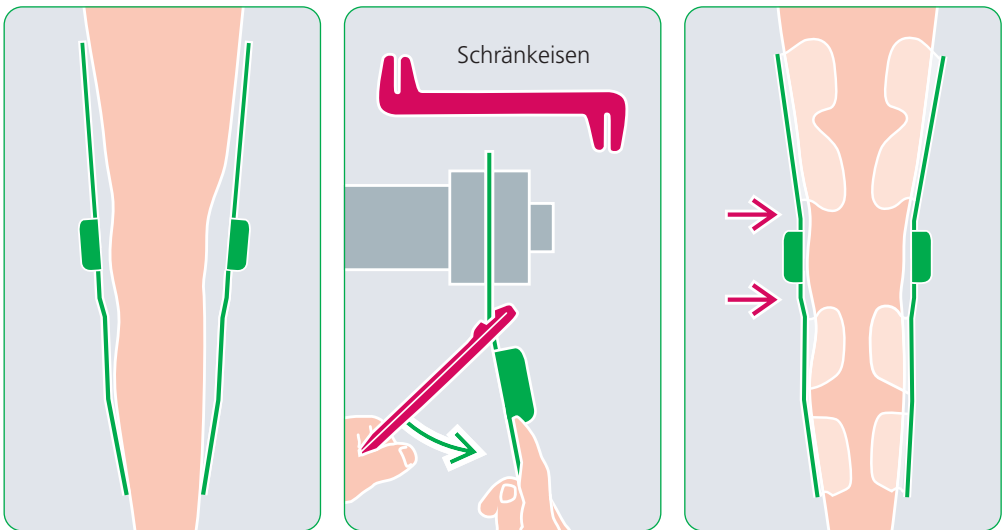

Beim Schränken der Gelenkstangen dürfen diese nicht im Bereich der Gelenkgehäuse oder Abdeckungen gebogen werden, da es sonst zur Beschädigung oder zum Bruch der Orthese kommen kann.

Beachten Sie:

- Die Einstellung beider Gelenke muss übereinstimmen.
- Beide Anschlagstifte je Gelenk müssen sich in den Stiftaufnahmen befinden.
- Die Gelenkabdeckungen müssen nach allen Einstellung immer verschlossen werden.

Hypex® Lite

Gebrauchsanweisung

2.3. Einstellung der Gelenke bei der Hypex® Lite Schiene L/L, L/M, M/L, M/S

Durch entsprechendes Positionieren der Anschlagstifte können Sie die Extensionsansschläge und die Flexionsansschläge in 15° Schritten limitieren.

Zum Einstellen der Extensions-/Flexionsansschläge bzw. zum Immobilisieren der Schiene müssen Sie folgende Arbeitsschritte ausführen.

2.3.1. Abdeckung öffnen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung.



Gebrauchsanweisung

2.3.2. Extensionsanschlag Einstellen

1 Zum Einstellen des Extensionsanschlages bringen Sie die Schiene in Flexion.



2 Positionieren Sie den Anschlagstift an der von Ihnen gewünschten Position.



Hypex® Lite

Gebrauchsanweisung

2.3.3. Feineinstellung einstellen

- 1 Zusätzlich können Sie die Extensionsanschläge durch die Feineinstellung stufenlos von 45° über 0° bis -15° einstellen.



2.3.4. Flexionsanschlag einstellen

- 1 Zum Einstellen des Flexionsanschlags bringen Sie die Schiene in Extension.



Gebrauchsanweisung

- 2 Positionieren Sie den Anschlagstift an der von Ihnen gewünschten Position.



2.3.5. Immobilisieren

- 1 Durch entsprechendes Positionieren eines Anschlagstiftes in die Bohrungen können Sie die Immobilisation in 15° Schritten festlegen und diese durch die Feineinstellung zusätzlich stufenlos von 45° über 0° bis -15° einstellen.



2.3.6. Uneingeschränkte Flexion einstellen

- 1 Für uneingeschränkte Flexion positionieren Sie einen Anschlagstift in Position ∞ .
- 2 Achten Sie darauf, dass sich beide Anschlagstifte des Gelenks in den Stiftaufnahmen befinden. In den Stiftaufnahmen der Extensionsanschlänge muss immer mindestens ein Stift positioniert sein.



Die Gelenkabdeckung muss nach Einstellung immer verschlossen werden, um die Anschlagstifte zu sichern.

Gebrauchsanweisung

2.4. Einstellung der Gelenke bei der Hypex® Lite Schiene S/S, XS/XS, XXS

Durch entsprechendes Positionieren der Anschlagstifte können Sie die Extensionsansschläge und die Flexionsansschläge in 10° Schritten limitieren.

Zum Einstellen der Extensions-/Flexionsansläge bzw. zum Immobilisieren der Schiene müssen Sie folgende Arbeitsschritte ausführen.

2.4.1. Abdeckung abnehmen

- 1 Drehen Sie die Abdeckung um 90° bis zum Anschlag.
- 2 Heben Sie die Abdeckung vom Gelenk ab.






Hypex® Lite

Gebrauchsanweisung



2.4.2. Extensionsanschlag einstellen

- 1 Zum Einstellen des Extensionsanschlags bringen Sie die Schiene in Flexion.
- 2 Positionieren Sie den Anschlagstift an der von Ihnen gewünschten Position.

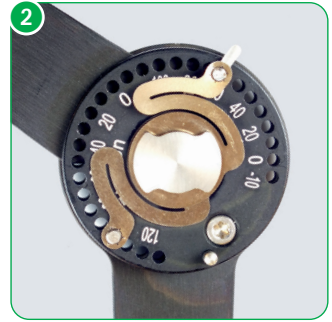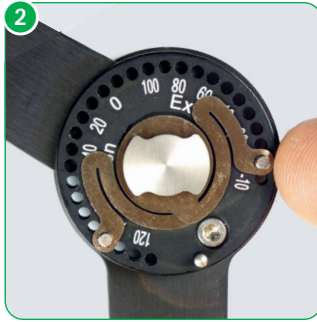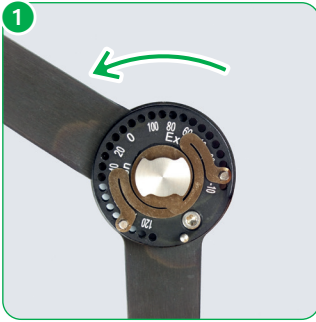

2.4.3. Flexionsanschlag einstellen

- 1 Zum Einstellen des Flexionsanschlags bringen Sie die Schiene in Extension.
- 2 Positionieren Sie den Anschlagstift an der von Ihnen gewünschten Position.

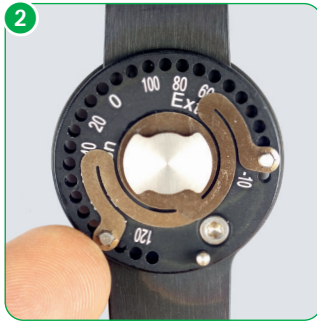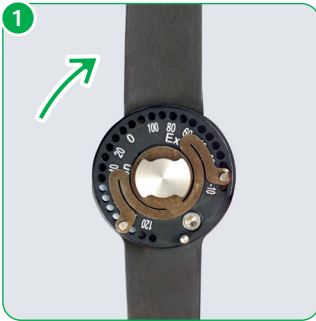


Gebrauchsanweisung

2.4.4. Immobilisieren

Zum Immobilisieren der Schiene stellen Sie zuerst den Extensionsanschlag ein. Bewegen Sie die Stütze gegen den Extensionsanschlag und positionieren Sie den Flexionsanschlag im Anschluss an die Stütze.

2.4.5. Abdeckung aufsetzen

- 1 Achten Sie darauf, dass sich beide Anschlagstifte des Gelenks in den Stiftaufnahmen befinden.
- 2 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und verdrehen Sie diese um 90° bis zum Einrastpunkt. Die Gelenkabdeckung muss nach Einstellung immer verschlossen werden, um die Anschlagstifte zu sichern.

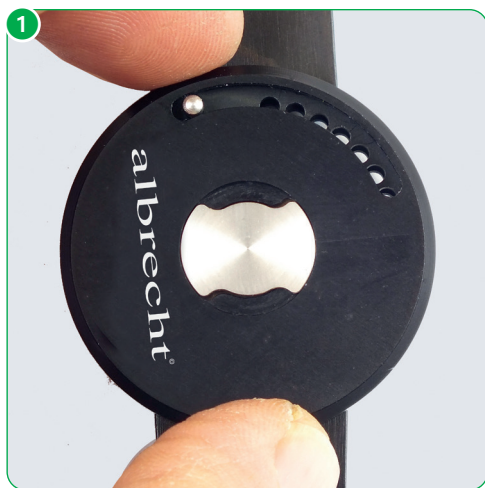

2.5. Anlegen der Schiene durch den Orthopädietechniker

2.5.1. Anlegen der Schiene

1 Vorbereiten: Stellen Sie die Länge der vorderen Schienengurte ein. Fädeln Sie diese dabei nicht aus den Schalen aus. Hängen Sie die hinteren Gurte durch Öffnen der Verschlüsse aus.

2 Anlegen: Winkeln Sie das Bein auf etwa 30° bis 45° ab und richten Sie die Schiene entsprechend Bild 1 auf dem Knie aus. Achten Sie darauf, dass die Drehpunkte der Schienengelenke mit dem Kniegelenkdrehpunkt übereinstimmen.


Position: Patellamitte, hinteres Gelenkdrittel

Durch das Einstellen der vorderen Gurte wird dieser Schritt beim erstmaligen Anlegen der Schiene erleichtert.

3 Fixieren: Verschließen Sie die hinteren Gurte und spannen Sie dabei die vorderen Gurte leicht.

Folgende Reihenfolge wird empfohlen:

1. Oberer Wadengurt
2. Oberer Schienbeingurt
3. Oberer Oberschenkelgurt hinten
4. Oberer Oberschenkelgurt vorne
5. Gelenksnaher Oberschenkelgurt hinten
6. Gelenksnaher Oberschenkelgurt vorne
7. Unterer Wadengurt hinten
8. Unterer Wadengurt vorne

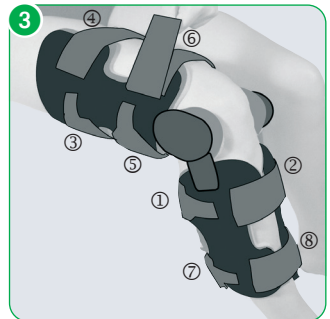


Gebrauchsanweisung

2.5.2. Einstellen der Textilschale bei Größe S/S, XS/XS, XXS

Die Textilschalen können bis 2,5 cm in der Höhe verstellt werden.

- 1 Lösen Sie die Schrauben an den Schalenelementen mit dem mitgelieferten Werkzeug.
- 2 Entfernen Sie die Textilschale.
- 3 Stanzen Sie mittels einer Lochzange senkrecht unterhalb des vorhandenen Schraubenlochs ein weiteres Loch (max. 2,5 cm).
- 4 Schieben Sie die Schale über die Stütze und befestigen Sie diese mittels des neuen Schraubenlochs.

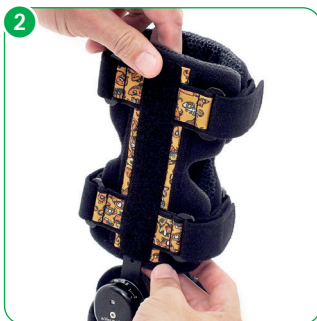

Bitte beachten Sie, dass bei der Größe S/S, XS/XS, XXS konstruktionsbedingt die Unterschenkelschale aus einer Textilschale besteht.

Hypex® Lite

Gebrauchsanweisung

Der optimale Sitz wird durch das straffe Verschließen der knienahen Unterschenkelgurte erreicht. Die beiden Gurte bilden einen Ring, der am Muskelbauch der Wade aufsitzt und so das Abrutschen der Schiene verhindert.




Überprüfen Sie nach dem Verschließen der einzelnen Gurte die richtige Position der Schiene und korrigieren Sie die Position wenn nötig. Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht zu fest angezogen sind, um die Durchblutung nicht zu beeinträchtigen.

2.5.3. Clipverschlüsse verwenden

- 1 Verschluss öffnen
- 2 Gurtöse einhängen
- 3 Verschluss schließen

Die Gurtlänge wird dabei nicht verändert.

Bei den Größen **Bambini** und **Malinki** erfolgt das Öffnen und Schließen über die Gurte.

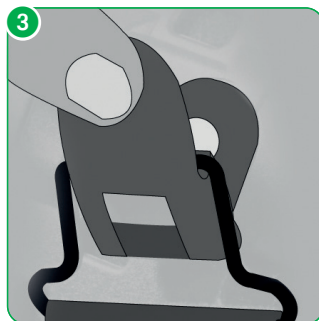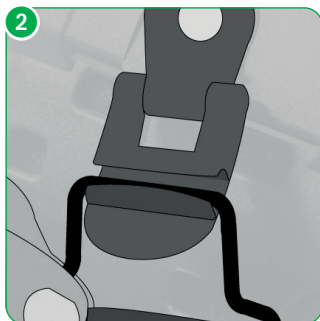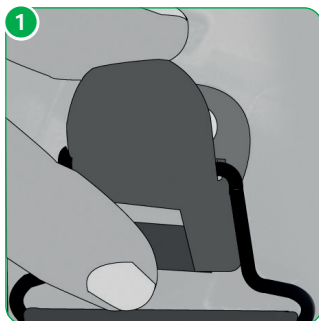

Gebrauchsanweisung



Handwäsche 30°C



Nicht Bleichen



Nicht Bügeln



Nicht chem. Reinigen



Nicht Trockner geeignet

3. Wartung

Um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten, ist die Orthese in regelmäßigen Abständen, jedoch spätestens alle 6 Monate auf Funktionalität und Verschleiß zu überprüfen. Sollte das Produkt und/oder dessen Komponenten verschlissen oder defekt sein, sind diese durch qualifiziertes Fachpersonal auszutauschen oder zu reparieren.

4. Reinigung und Desinfektion

Um über den Behandlungszeitraum eine einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten, ist die Orthese regelmäßig (mindestens alle 3 Monate) oder bei Bedarf nach den folgenden Anweisungen zu reinigen.

4.1. Polster und Gurte

- Sämtliche Textilien können bei 30°C mit Wasser und einem milden Waschmittel und/oder Desinfektionsmittel von Hand gewaschen werden.
- Keine Maschinenwäsche.
- Bei stärkeren Verschmutzungen ist ein Austauschatz Textilteile erhältlich.

4.2. Stützen (Gelenke)

- Kunststoff- und Aluteile mit einem feuchten Tuch mit Wasser und einem milden Waschmittel und/oder Desinfektionsmittel abwischen.
- Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen.
- Vollständig benetzen, nicht nachwischen.
- Unzugängliche Flächen einsprühen.
- Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.

Hypex® Lite

Gebrauchsanweisung

- Es wird ein mildes Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis empfohlen.

Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und beachten Sie die Hinweise des Desinfektionsmittelherstellers. Die Robert-Koch-Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie auf www.rki.de.

5. Technische Daten / Materialien

Bezeichnung	Material
Gewicht	876 g
Polstermaterial	PU-Schaum mit PA-Klettvelours
Gurtmaterial	PA-Gurt mit PA-Klettvelours
Schienenmaterial	Aluminium

Gebrauchsanweisung

6. Größentabelle und Artikelnummernübersicht

Bezeichnung	Länge am Oberschenkel medial	Länge am Unterschenkel medial	Umfang am Oberschenkel	Umfang am Unterschenkel	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
Hypex® Lite L/L	24 cm	26,5 cm	36 - 66 cm	27 - 47 cm	804LL-L	804LL-R
Hypex® Lite L/M	19 - 23 cm	25 - 28 cm	33 - 44 cm	24 - 35 cm	804LM-L	804LM-R
Hypex® Lite M/L	18 - 21 cm	20 - 23 cm	36 - 63 cm	27 - 45 cm	804ML-L	804ML-R
Hypex® Lite M/S	17 - 20 cm	21 - 25 cm	36 - 63 cm	22 - 32 cm	804MS-L	804MS-R
Hypex® Lite S/S	18 cm	20 cm	30 - 40 cm	22 - 32 cm	804SS-L	804SS-R
Hypex® Lite XS/XS	15 cm	18 cm	25 - 35 cm	20 - 30 cm	804XSXS-L	804XSXS-R
Hypex® Lite XXS	12 cm	15 cm	20 - 30 cm	15 - 25 cm	804XXS-L	804XXS-R
Junior Grün	18 cm	20 cm	30 - 40 cm	22 - 32 cm	804SS-GL	804SS-GR
Junior Blau	18 cm	20 cm	30 - 40 cm	22 - 32 cm	804SS-BL	804SS-BR
Junior Orange	18 cm	20 cm	30 - 40 cm	22 - 32 cm	804SS-OL	804SS-OR
Junior Pink	18 cm	20 cm	30 - 40 cm	22 - 32 cm	804SS-PL	804SS-PR
Bambini Grün	15 cm	18 cm	25 - 35 cm	20 - 30 cm	804XSXS-GL	804XSXS-GR
Bambini Blau	15 cm	18 cm	25 - 35 cm	20 - 30 cm	804XSXS-BL	804XSXS-BR
Bambini Orange	15 cm	18 cm	25 - 35 cm	20 - 30 cm	804XSXS-OL	804XSXS-OR
Bambini Pink	15 cm	18 cm	25 - 35 cm	20 - 30 cm	804XSXS-PL	804XSXS-PR
Malinki Grün	12 cm	15 cm	20 - 30 cm	15 - 25 cm	804XXS-GL	804XXS-GR
Malinki Blau	12 cm	15 cm	20 - 30 cm	15 - 25 cm	804XXS-BL	804XXS-BR
Malinki Orange	12 cm	15 cm	20 - 30 cm	15 - 25 cm	804XXS-OL	804XXS-OR
Malinki Pink	12 cm	15 cm	20 - 30 cm	15 - 25 cm	804XXS-PL	804XXS-PR

7. Weitergabe

Die Schiene ist nicht für den Einmalgebrauch, jedoch für die mehrmalige Verwendung durch nur eine Person bestimmt. Von einer Weitergabe raten wir ab. Sollte dies dennoch gewünscht sein, beachten Sie vor Weitergabe die Pflege- und Reinigungshinweise und lassen die Schiene durch den autorisierten Fachhandel auf sichere und einwandfreie Funktion hin überprüfen.

8. Entsorgung

Die Schiene enthält recyclingfähige Materialien ohne toxische oder andere umweltschädigende Stoffe und Substanzen. Sofern sie nicht mit infektiösen Keimen kontaminiert ist, kann sie der normalen Entsorgung zugeführt werden. Um sicher zu gehen, konsultieren Sie Ihr Orthopädiefachgeschäft.

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind Sie verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als auch dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Gebrauchsanweisung

Hypex® Lite

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

HMV-NR.: 23.04.03.2014

PATENTE: DE 199 33 197 / EP 0 956 837 / US 6,375,632
WEITERE PATENTE ANGEMELDET

STAND: DE 03.2023



Medical device (Medizinprodukt)



Hersteller



 **albrecht GmbH**

CHIEMSEESTRASSE 81
D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE

T +49 (0)8051 96129-0

F +49 (0)8051 96129-30

INFO@ALBRECHTGM.BH.COM
WWW.ALBRECHTGM.BH.COM



Made in Germany
Hergestellt in Deutschland



Management
System
EN ISO
13485:2016

www.tuv.com
ID 000046096